



Parker Laboratories, Inc.
286 Eldridge Road Fairfield, NJ 07004 USA
www.parkerlabs.com

ООО «Неотонус-Инвест»
Эксклюзивный дистрибьютор в Республике Беларусь
ул. Калиновского, 31а, оф. 16, г. Минск, Республика Беларусь, 220103
+375 17 281-27-11
www.parkerlabs.by



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Aquasonic[®] 100

гель проводящий для ультразвуковых исследований

Aquasonic CLEAR[®]

гель для ультразвуковых исследований

SCAN[®]

гель для ультразвуковых исследований

REF 01-02, 01-08, 01-34, 01-50

REF 03-02, 03-08, 03-34, 03-50, 03-54

REF 11-08, 11-28, 11-28s





ОПИСАНИЕ

Aquasonic[®] 100, Aquasonic CLEAR[®] и SCAN[®] являются нестерильными, водорастворимыми, не окрашивающими. Предназначены только для наружного применения и могут использоваться со всеми ультразвуковыми аппаратами.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Aquasonic[®] 100, Aquasonic CLEAR[®] и SCAN[®] могут использоваться на неповрежденной коже у всех пациентов в местах, с минимальным перекрестным загрязнением. После использования пустой диспенсер необходимо утилизировать.

Заправочные емкости и многоразовые диспенсеры (номера товаров 01-50, 03-50, 03-54, 11-28 и 11-28s) предназначены для использования на пациентах с низким уровнем риска во всех учреждениях, кроме оказания неотложной помощи.

Aquasonic[®] 100, Aquasonic CLEAR[®] и SCAN[®]
предназначены только для наружного применения!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Aquasonic[®] 100, Aquasonic CLEAR[®] и SCAN[®]
запрещены для использования:

- ✓ при любых инвазивных процедурах, связанных с повреждением тканей
Например: *аспирационная биопсия, применение локализационных игл, биопсия тканей или другие хирургические процедуры;*
- ✓ при любых процедурах на или около поврежденной кожи,
Например: *свежее хирургическое вмешательство или на открытых ранах;*
- ✓ при использовании на пациентах с ВИЧ или находящихся на иммуносупрессивной терапии;
- ✓ при использовании на новорожденных или тяжело больных педиатрических пациентах;
- ✓ при использовании на слизистых оболочках;
- ✓ при использовании на тяжело больных пациентах.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- ✓ Хранить в сухом прохладном месте.
- ✓ Избегать попадания прямых солнечных лучей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ✓ Не используйте товар, если повреждена упаковка или присутствуют признаки загрязнения.
- ✓ Не используйте на пациентах, чувствительных к парабенам.
- ✓ Чтобы избежать загрязнения, наконечники контейнеров не должны вступать в контакт с пациентами, медицинским персоналом и инструментами.

Наносите **Aquasonic[®] 100, Aquasonic CLEAR[®] и SCAN[®]**
на поверхность датчика, а не на пациента.

УКАЗАНИЯ К НАПОЛНЕНИЮ ДИСПЕНСЕРНЫХ ЕМКостей

- Перед заправкой диспенсерных емкостей, протрите верхнюю часть диспенсера и его наконечник изопропиловым спиртом или дезинфицирующими средствами, разрешенными местным законодательством к применению в медучреждениях.
- Многоцветные емкости должны быть промыты в горячей мыльной воде и тщательно высушены перед наполнением.
- Перед любой повторной заправкой диспенсерных емкостей, оставшийся в емкости гель необходимо утилизировать.
- Заполняйте емкости только продуктом, соответствующего наименования.
- Заполненные емкости должны быть маркированы датой наполнения, а содержимое должно быть использовано в течение одного месяца после даты наполнения.

Поврежденные емкости запрещены к применению!